

Estuche y refacciones de jeringas McLintock

Jeringas de precisión McLintock.

Para la Aplicación de la prueba de Tuberculina

Venta controlada para uso veterinario.

Ficha Técnica

1. Nombre.

Estuche y refacciones de jeringas McLintock

2. Contenido.

Cada estuche contiene:

Dos jeringas de precisión precalibradas para la implementación de la prueba de tuberculina en ganado bovino.

3. Uso.

Para la implementación de la prueba caudal, prueba cervical simple, y prueba cervical comparativa

4. Instrucciones.

El diseño de la jeringa permite la pre configuración de hasta 20 dosis de 0.1 ml.

5. Características del producto.



6. Precauciones y advertencias.

La anilla del pistón no debe ser apretada en exceso, para asegurar una larga duración y trabajo apropiado es esencial que la jeringa sea regularmente desmontada y limpiada. Después de esterilizar (en autoclave), es recomendable lubricarla bajo la palanca de presión y las pestañas que empujan la barra de émbolo y el vástago, con aceite en poca cantidad. Con la ayuda de una pequeña brocha lubricar el vástago con parafina. Para desmontar, desenroscar el capote del cilindro y cilindro de la carcasa. Las pestañas empujadoras deben ser renovadas o limpiadas regularmente. Las pestañas deben estar siempre limpias y libres de impurezas, y se deberán lubricar.

7. Periodo de vigencia (caducidad).

No aplica. La duración de este producto dependerá del cuidado y mantenimiento que se le proporcione.

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO